



ベッドサイドマット II

取扱説明書
保管用

このたびはお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みいただいた上でご使用ください。
また、この取扱説明書は、いつでもご覧いただけるように大切に保管していただくようお願い申し上げます。

使用上の注意

【警告】

- 包装用のポリ袋をかぶると、窒息する危険があります。製品を取り出した後は、穴をあけて廃棄してください。
- 火または温度の高いものに近づけないでください。火災や火傷の原因となります。
- 本製品はベッドからの転落時などの衝撃を緩和するものであり、怪我を防止することを保証するものではありません。本製品を使用しても、骨折などの重傷を負う可能性はありますので、十分注意してお使いください。

【注意】

- 製品上での喫煙は、おやめください。火種の落下等により製品に火が燃え移ると、火災や火傷の原因となります。
- 室内の平坦な床面で、広げた状態でお使いください。屋外や段差のあるところでの使用は、製品を破損することがあります。
- 床面や製品が濡れた状態では、使用しないでください。滑ることがあります。
- ベッドや家具など、重いものを長時間一定の場所に載せないでください。変形することがあります。
- 製品を振り回したり、製品で物や人を叩いたりしないでください。
- 過度の力を加えると、破損の原因となります。
- 製品を折り曲げないでください。破損の原因になります。
- 常に乾燥した清潔な状態で使用してください。

特徴とご使用方法

- ご使用の際は、なるべくベッドに近づけ、ベッドと並行になる様に床面に置いてください。
- 18mmと従来品より厚みが薄くなり、ベッドサイドに置いても歩行の妨げになりにくいです。
- 衝撃吸収性の高い素材を使用しています。柔らかすぎず、マット上を歩いても不安定になりにくいです。
- 表面にはおしゃれな柄を施し、落ち着いた色合いで、置く部屋を選びません。

お手入れ方法

- 汚れた場合は、中性洗剤を含んだ布等で拭いてください。感染性の汚れに対しては、指定濃度に希釈した薬液（消毒用エタノール）、グルコル酸クロルヘキシジン（ヒビテン）、塩化ベンザルコニウム（オスバン）、塩化ベンゼトニウム（ハイアミン）などを使用して拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や、次亜塩素酸ソーダ（ハイターなど）は使用できません。

商品名	サイズ	材質
ベッドサイドマット II	厚み 18× 幅 600× 長さ 1500mm	ウレタンフォーム