

このたびはお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みいただいた上でご使用ください。
また、この取扱説明書は、いつでもご覧いただけるように大切に保管していただくようお願い申し上げます。

⚠ 警告


- 火または温度の高いものに近づけないでください。火災や火傷の原因となります。
- 乳幼児が本体を口に入れると窒息する危険があります。乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 本製品は、効果的に体圧を分散しますが、褥瘡（床ずれ）の発生を完全に防止できるものではありません。定期的な体位変換などにより、適宜圧迫を開放してください。

⚠ 使用上の注意

- 皮膚に反応性の充血や圧迫による影響が見られないか、状態を観察しながらお使いください。異常が認められた場合直ちに使用を中止し、医師等の指示に従ってください。特に本製品を使い始めた時は、こまめに皮膚の状態を確認してください。
- 本製品の上で飛び跳ねないでください。けがをしたり、破損の原因となります。
- 人を乗せた状態で、本製品を移動させないでください。落下により怪我をする恐れがあります。
- 本製品の上で突起物（ハサミ、ナイフ等）の使用はお避けください。破損の原因になることがあります。
- 持ち運ぶ時は裏面にある持ち手をご利用ください。カバーやウレタン部分だけで本製品を持ち上げると破損することがあります。
- アンカ、電気毛布など高い温度で長い時間放置しますと変形する恐れがありますのでご注意ください。
- 製品の品質・性能を保つため、直射日光、紫外線が当たらない場所に保管してください。
- 圧迫した状態での保管や、無理な力（折り曲げ、引っ張り、ねじる等）を加えないでください。
- 本製品は、使用状況・環境によりウレタンが変色する場合があります。また、ウレタン生産の都合上、表面に縞が発生することがありますが、製品の機能上問題ありませんので、そのまま使用してください。
- 本製品は、完全防水では有りません。カバー、ウレタン共に常に乾燥させた状態で使用してください。
- ご使用を始められた後しばらくの間、臭いを感じる場合がございますが、体に害を与える様な有害物質は含んでおりません。気になる場合は、十分に陰干してから使用してください。

● 使用方法

- 「FACET」とプリントがある面を上にご使用ください。
- 持ち運びの際は、必ず裏面にある持ち手をご利用ください。
- ベッドメイクの際は、シーツをゆるめに掛け、必要に応じて薄手のベッドパッドを併用してください。

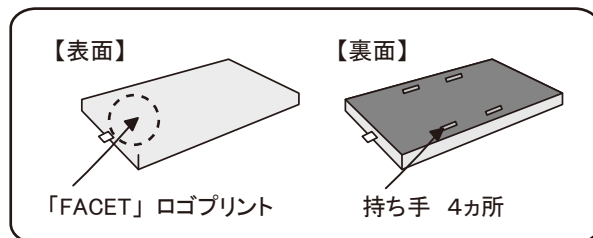

● お手入れ方法

- カバー
 - ・汚れた場合は洗濯できます。洗濯表示に従ってお手入れしてください。
 - ・中芯材は必ず取り出し、ファスナーを閉めてお手入れをしてください。
- 中芯材
 - ・家庭用洗濯機では洗えません。汚れた場合には乾いたタオルもしくは固く絞った濡れタオルでたたくようにして拭いた後、十分に乾燥させてからご使用ください。
 - ・スリット加工された面が表面です。カバーを装着する際には表裏をお確かめください。

< 業務用洗濯サービスでの洗濯方法 >

平置き式の洗濯機で60℃以下の洗濯、乾燥温度は80℃以下で実施することを推奨します。これ以上の温度で乾燥させるとウレタン劣化が早まる場合があります。次亜塩素酸ソーダの添加は、ウレタンを劣化させますのでおやめください。
水分を含んでいる場合は、風通しの良い日陰でよく乾燥させてから使用ください。