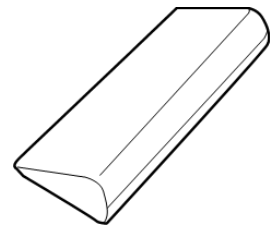


超通気サーティパッド ホワイト

取扱説明書

INOAC

使用上の注意

⚠ 警告

- ・ 包装用のポリ袋をかぶると、窒息する危険があります。クッションを取り出した後は、穴をあけて廃棄してください。
- ・ このクッションは、床ずれ予防のための30度側臥位など、体位保持に有用ですが、同一体位の固定は床ずれの発生などにつながります。定期的な体位変換を、必ず行ってください。また、床ずれは圧力の分散だけでは防止できません。湿潤、摩擦やずれ、栄養など、多方面からの総合的なケアが必要です。医師や看護師、理学療法士、作業療法士、リハエンジニアなどの指導のもとで、十分なケアを行いながら、本製品をお使いください。

⚠ 注意

- ・ このクッションは、お休みの方の身体の下に入れて、30度側臥位など半側臥位の体位をとるために作られています。それ以外の目的に使用しないでください。
- ・ 製品を使用中の喫煙は、おやめください。火種の落下等により製品に火が燃え移ると、火災や火傷の原因となります。
- ・ 過度の荷重や力を加えると、破損の原因となります。特に認知症の方など、判断力理解力等の問題から過度の力を加える可能性のある人にお使いいただく場合などは、ケアされる方が十分に注意をしてください。
- ・ クッションを当てた後、クッションのカバーや衣服に「しわ」が出来ていないか、確認してください。しわがある場合は、伸ばしてください。圧迫の原因となります。
- ・ 皮膚に反応性の充血など、圧迫による影響が見られないか、状態を観察しながらお使いください。異常が認められた場合、直ちに使用を中止し、医師等の指示に従ってください。特にクッションを使い始めた時は、こまめに皮膚の状態を確認してください。
- ・ 瘡部（発赤を含む）には直接当てないでください。
- ・ 麻痺や感覚障害のある方にお使いになる場合、クッションを入れたことにより無理な力がかかっても、分からないことがあります。十分に気をつけてお使いください。
- ・ 肩（肩甲骨・肩関節）と骨盤（腰骨）の両方を、クッションで支えてください。どちらかが浮いていると、脊柱がねじれて腰痛などの原因となることがあります。
- ・ 常に乾燥した清潔な状態で使用してください。特に洗濯後は、日陰で十分乾かしてから使用してください。カビの発生や、過湿による皮膚のしん軟（ふやけ）によるトラブルなどを引き起こすことがあります。
- ・ 直接日光にあてないでください。ウレタンの劣化が早まります。

製品の特徴

- ・ 中芯には、特殊高通気ウレタンフォームを使用。適度なクッションでやさしく身体を支えます。また通気性がよく、ムレの心配がありません。
- ・ 中芯の角度が30度になっているので、楽々体位変換。その後も30度側臥位を保持します。
- ・ ウレタンは中カバーに縫い込まれていますので、外カバーがウレタンに引っかかって「しわ」になりにくくなっています。また、ウレタンを保護しながら丸洗いができます。
- ・ 安心の日本製です。

お手入れの方法

○ 外カバー

- ・ 汚れた場合は、洗濯できます。40℃前後のぬるま湯で、洗剤は無蛍光の中性洗剤をご使用ください。蛍光剤入りの洗剤をご使用になられますと、色が変わって見える場合がありますので、十分ご注意ください。
- ・ 塩素系漂白剤（ハイター等）は使用しないでください。
- ・ アイロンがけは避けてください。

○ 中芯

- ・ 汚れた場合は、洗濯できます。手洗いで丸洗いし、日陰で自然乾燥させてください。乾燥機でのタンブラー乾燥はできません。
- ・ 業務用洗濯も可能ですが、プレス脱水はできません。業務用乾燥の場合、平置式の乾燥機で、吸込み100℃以下としてください。
- ・ 塩素系漂白剤（ハイター等）は使用しないでください。除菌漂白をする場合は、過酸化水素系の漂白剤を使用してください。ドライクリーニングもできません。

[主な仕様]

品名	寸法(約・cm)	重量(約・g)	材質
サーティパッド800	高さ12×長さ80×奥行24	540	外カバー:綿70%、ポリエステル30% 中カバー:ポリエステル100% 中芯:ウレタンフォーム(特殊高通気タイプ)
サーティパッド600	高さ12×長さ60×奥行24	400	
サーティパッド400	高さ12×長さ40×奥行24	270	

(800、600、400 共通取扱説明書)