

おふとんベッドⅡ

取扱説明書

保存用

このたびはお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みいただいた上でご使用ください。
また、この取扱説明書は、いつでもご覧いただけるように大切に保管していただくようお願い申し上げます。

ご使用方法

○本製品は830mm幅、910mm幅の介護マット用ベッドです。マットレスサイズをご確認の上ご使用ください。

※おふとんベッドⅡ対応マットレスサイズ


830幅用 厚み80～100×幅830×長さ1910mm

910幅用 厚み80～100×幅910×長さ1910mm

○必ずマットレスを設置の上ご使用ください。

○10cm以上厚みのあるマットレスは使用しないでください。

ベッド枠よりもマットレスが高くなり転落の可能性が高くなります。

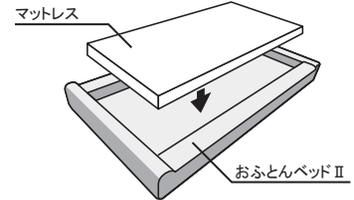

お手入れ方法

○本製品は洗えません。カバーから取り出さないでください。

○カバー表面が汚れた場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭き取り、水拭き後風通しのよい場所で陰干ししてください。

○常に乾燥した清潔な状態で使用してください。本製品やマットレスに湿気がたまると、カビの元となり、不衛生になります。特に通気性のあるマットレスを使用されているとき、湿度の高いとき、室温変化が大きいときには、結露して水がたまりやすくなります。数日に一回は、本製品からマットレスを出して干すなどして、十分に乾燥させた状態でお使いください。

また、本製品も時々床から浮かせて、床面との間も乾燥させてください。

防水カバーを使用していますが、完全防水ではありません。縫い目などから液体が入りますので、カバーに故意に液体をかけることや、本製品を丸ごと洗うようなことはお止めください。

使用上のご注意

警告

○火又は温度の高いものに近づけないでください。火災や火傷の原因となります。

○包装用のポリ袋をかぶると、窒息する危険があります。本製品を取り出した後は穴をあけて廃棄してください。

○乳幼児が本体を口に入れると窒息する危険があります。乳幼児の手の届かない所に保管してください。

○心臓マッサージ等、反動性の強い床の上でないと効果がない処置を行う場合は、ご使用を控えてください。

○本製品は、床からの高さが非常に低くなっておりませんが、転落時の安全を保証するものではありません。転落した際には骨折などの重大な傷害を負う恐れがあります。転落が予想される場合、衝撃を和らげる工夫などを併用してください。

注意

○本製品の上で飛び跳ねないでください。けがをしたり、破損の原因となります。

○人を乗せた状態で、本製品を移動させないでください。落下により怪我をする恐れがあります。

○本製品の上で突起物（ハサミ、ナイフ等）の使用はお避けください。破損の原因になることがあります。

○突起物のない平らな場所に設置してください。破損の原因になります。

○持ち運ぶ時は、二人以上で移動し、中のウレタン部分を持ってください。カバーだけで本製品を持ち上げるとカバーが破損することがあります。

○アンカ、電気毛布など高い温度で長い時間放置しますと変形する恐れがありますのでご注意ください。

○低温環境下（5℃以下）では本体が硬くなる場合があります。その場合は室温になじませてからご使用ください。

○製品の品質・性能を保つため、直射日光、紫外線が当たらない場所に保管してください。

○圧迫した状態での保管は避けてください。

○本製品は、使用状況・環境によりウレタンが変色する場合があります。

○ご使用を始められた後しばらくの間、臭いを感じる場合がございますが、体に害を与える様な有害物質は含んでおりません。臭いになる場合は、十分に陰干してから使用してください。