

このたびはお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みいただいた上でご使用ください。  
また、この取扱説明書は、いつでもご覧いただけるように大切に保管していただくようお願い申し上げます。

### 警告

- 火気を近づけないでください。溶けたり燃える場合があります、火災や火傷の原因となります。
- 本製品は、標準型車いすでの座位姿勢をサポートしますが、全ての人に対応できるものではありません。車いすサイズとのマッチング、体の状況などによっては、効果が得られない場合があります。体に合わない場合は使用を中止し、お近くのリハビリセンターや理学療法士、作業療法士リハビリエンジニアなどにご相談ください。

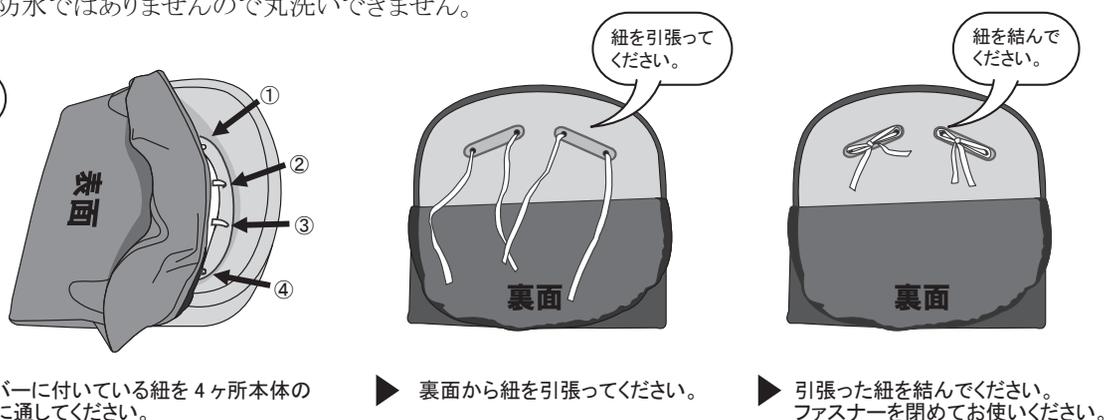
### 使用上の注意

- 皮膚に反応性の充血など、圧迫による影響が見られないか、状態を観察しながらお使いください。異常が認められた場合直ちに使用を中止し、医師等の指示に従ってください。特に本製品を使い始めた時は、こまめに皮膚の状態を確認してください。
- 過度の荷重や力を加えると、破損の原因となります。特に認知症の方など、判断力理解力等の問題から過度の力を加える可能性のある人にお使いいただく場合などは、十分に注意してください。
- 車いすをお使いになる方の体のサイズや状態と、車いすが合っていないことに起因する座位姿勢の問題などは、本製品では解決できません。車いすとのマッチングも合わせてご確認ください。
- 車いすの上に水平に設置してください。誤った設置をされるとケガや破損の原因となります。
- 車いすと本製品の間にアジャスター以外のものを挟まないでください。ケガや破損の原因となります。
- 本製品の上で突起物（ハサミ、ナイフ等）の使用はお避けください。破損の原因になることがあります。
- 本製品の上に物を置くと落下の危険がありますのでご注意ください。
- 本製品の上で飛び跳ねたり、足で踏んだりしないでください。破損の原因になることがあります。
- 常に乾燥した清潔な状態で使用してください。特にカバーリングタイプのカバー洗濯後は、日陰で十分乾かしてから使用してください。カビの発生や、過湿による皮膚のしん軟（ふやけ）によるトラブルなどを引き起こすことがあります。
- 製直射日光、紫外線が当たらない場所に保管してください。カバー及び本体の変色、劣化を促進する可能性があります。
- 重量のあるものを置いた状態で保管しないでください。
- 圧迫した状態での保管は避けてください。
- ご使用を始められた後しばらくの間、臭いを感じる場合がございますが、体に害を与える様な有害物質は含んでおりません。気になる場合は、十分に陰干してから使用してください。
- 本製品は、使用状況・環境によりウレタンが変色する場合があります。
- 本製品が変形・破損した場合は使用を中止してください。
- カバーを強く引っ張らないでください。本体が破損する場合があります。
- コーティングタイプは完全防水ではありません。水の中に入れてたり、洗わないでください。

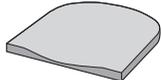
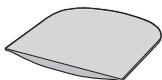
### お手入れ方法

- 本体、アジャスターは洗濯できません。汚れてしまった場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭き取り、水拭き後風通しのよい場所で陰干ししてください。消毒が必要な場合は、指定濃度に希釈したエタノールやヒビテン等の消毒薬で湿らせた布で拭き取るか、速乾性消毒薬（ウエスパス等）を少量かけ、軽く拭きとった後、日陰でよく乾燥させてください。濡れてしまった場合も、風通しの良いところで陰干ししてください。
- カバーリングタイプのカバーは洗濯が可能です。カバーに付いている洗濯表示に従って洗濯してください。カバー取付の際は、下記のように行ってください。
- コーティングタイプは完全防水ではありませんので丸洗いできません。

#### カバー取り付け時の手順

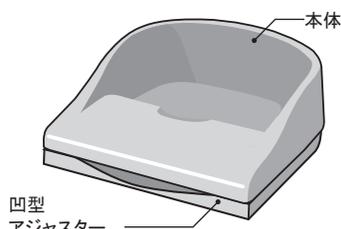
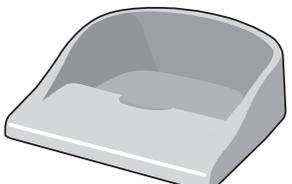
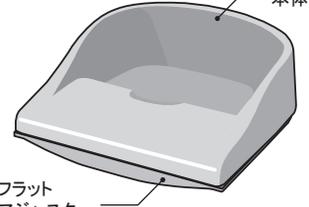
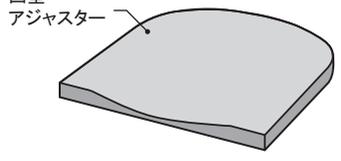
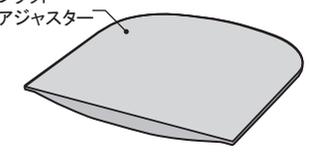


## パーツリスト

カバーリング タイプ				
	本体	カバー (納入時カバーは本体に被っています。)	凹型 アジャスター	フラット アジャスター
コーティング タイプ				
	本体 (ウレタンコーティング)	凹型 アジャスター	フラット アジャスター	

## ご使用方法

- ①本製品をお使いの車椅子クッションにセットします。  
 体型に合わせて調節可能なアジャスター付きです。調節しながらお使いください。  
 車いすにセットする際は、車いすの背面シートにぴったりと付けるように、シート奥まで乗せてください。

	サポートが足りない方	標準	標準で圧迫感を感じる方
使い方			
アジャスター	 凹型の面を上にして 使用してください。 凹型アジャスターを下に敷いてお使い ください。座面を深く沈み込ませて、 より高い安定性を実現します。	— 車いすクッションにそのまま敷いて お使いください。	 フラット面（平面）を上にして 使用してください。 フラットアジャスターを下に敷いてお 使いください。座面の沈み込みを抑 え、座部を大きく保ちます。

- ②車いすの各部を調節します。  
 特にクッションを入れたことで、着座高さが変わってしまいます。フットサポート（フットレスト）高さでアームサポート（アームレスト）の高さは、必ず確認調節してください。

品名	カラー	JANコード	サイズ (cm)
SWIMO カバーリングタイプ	ブルー	4971458665744	40×40×12.5
SWIMO コーティングタイプ	パープル	4971458665751	40×40×12.5
	スカイブルー	4971458665768	
	レモンイエロー	4971458665775	

- 材質 ○カバーリングタイプ 本体：ウレタンフォーム  
 カバー：表面 ポリエステル100%、ウレタンフォームラミネート  
 底面 ナイロン100%  
 ○コーティングタイプ 本体：ウレタンフォーム コーティング：ポリウレタン樹脂  
 ○アジャスター：ポリエチレン

日本製

お問い合わせ先

株式会社 **イノアックリビング**

TEL **0120-790-593**

受付時間 10:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝日と年末年始等は除く)

221013