

このたびはお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みいただいた上でご使用ください。  
また、この取扱説明書は、いつでもご覧いただけるように大切に保管していただくようお願い申し上げます。

## ⚠ 警告


- 火または温度の高いものに近づけないでください。火災や火傷の原因となります。
- 乳幼児が中材を口に入ると窒息する危険があります。乳幼児の手の届かない所に保管してください。

## ⚠ 使用上の注意

- 皮膚に反応性の充血など、圧迫による影響が見られないか、状態を観察しながらお使いください。異常が認められた場合直ちに使用を中止し、医師等の指示に従ってください。特に本製品を使い始めた時は、こまめに皮膚の状態を確認してください。
- 本製品の上で飛び跳ねないでください。けがをしたり、破損の原因となります。
- 人を乗せた状態で、本製品を移動させないでください。落下により怪我をする恐れがあります。
- 本製品の上で突起物（ハサミ、ナイフ等）の使用はお避けください。破損の原因になることがあります。
- 突起物のない平らな場所に設置してください。破損の原因になります。
- カバーだけで本製品を持ち上げるとカバーが破損することがあります。必ず中材ごと一緒に持ち上げ移動させてください。
- 局部的なへたり（へこみ）が見られる時は、十分な圧力分散効果が得られないことがありますので、使用しないでください。
- アンカ、電気毛布など高い温度で長い時間放置しますと変形する恐れがありますので注意ください。
- 製品の品質・性能を保つため、直射日光、紫外線が当たらない場所に保管してください。
- 圧迫した状態での保管は避けてください。
- 本製品は、使用状況・環境によりウレタンが変色する場合がありますが、性能には問題ありません。
- 本製品は、製造の工程上、一部製品接着界面にズレが生じる場合があります。機能上には問題ありません。
- ご使用を始められた後しばらくの間、臭いを感じる場合がございますが、体に害を与える様な有害物質は含んでおりません。気になる場合は、十分に陰干してから使用してください。

## ● 製品の特長

- リバーシブル仕様で耐久性にも優れた、洗濯乾燥対応のマットレスです。
- ハード面には、溝を設けています。ギャッジアップに連動し、ベッドフレームの動きに追従しやすくなります。
- 「ハード」面、「ソフト」面、リバーシブルでご使用いただくことができます。「ハード」面はしっかりと支え、「ソフト」面は「ハード」面にと比べると柔らかい感触です。

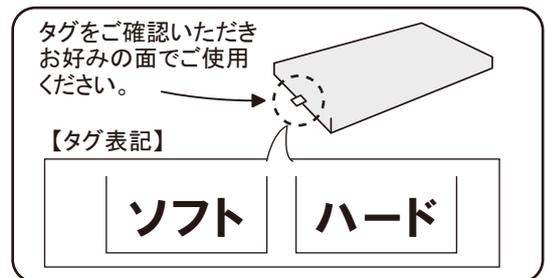

## ● お手入れ方法

- カバー
  - ・汚れた場合は洗濯できます。洗濯表示に従ってください。
  - ・中材は必ず取り出し、ファスナーを閉めて洗濯してください。
- 中芯
 

家庭用洗濯機では洗えません。洗濯をする場合は、業務用のマットレス洗濯サービス、もしくはふとん丸洗いサービスなどにご依頼ください。

<業務用洗濯サービスでの洗濯方法>

平置き式の洗濯機か、丸めてバンド掛けする洗い方で洗濯してください。乾燥温度は80℃以下で実施することを推奨します。これ以上の温度で洗濯するとウレタンの劣化が早まる場合があります。

次亜塩素酸ソーダの添加は、ウレタンを劣化させますのでおやめください。（過酸化水素は使用可能です。）

通常の小さな汚れに対しては、固く絞った布でたたくように拭き取ってください。その後、日陰でよく乾燥させてください。濡れてしまった場合も、風通しの良いところで陰干してください。