

このたびはお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みいただいた上でご使用ください。  
また、この取扱説明書は、いつでもご覧いただけるように大切に保管していただくようお願い申し上げます。

## ⚠ 取扱上のご注意

<b>⚠ 警告</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○火または温度の高いものに近づけないでください。火災や火傷の原因となります。</li><li>○包装用のポリ袋をかぶると、窒息する危険があります。クッションを取り出した後は穴をあけて廃棄してください。</li><li>○カバーが破損して、中材を飲み込んでしまった場合、吸い込んだり耳に入ったりした場合は、医師に相談し指示に従ってください。</li><li>○カバー破損などで中材がこぼれ出た場合、速やかに使用を中止し、ほかのポリ袋に入れるなど、中材が飛散して吸い込んだり飲み込んだりしないような処置をしてください。</li></ul>
<b>⚠ 注意</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>○クッションで口や鼻を覆ってしまわないように配置してください。特に、うつ伏せや横向き時は充分にご注意ください。</li><li>○ベッドや車いすなどに乗り降りする際は、クッションを外してください。転落してケガをするおそれがあります。</li><li>○人が乗った状態のまま移動しないでください。転落してケガをしたり、クッションが破損するおそれがあります。</li><li>○本製品だけでは床ずれは予防できません。体位変換を不要にするものではありませんので適切なケアを行ってください。</li><li>○体格や目的に合わせてクッションを選んでお使いください。合っていないクッションを使うと十分な効果が得られないことがあります。</li><li>○過度の荷重や力を加えると、破損の原因となります。特に認知症の方など、判断力や理解力等の問題から過度の力を加える可能性のある人にお使いいただく場合などは、十分に注意してください。</li><li>○常に乾燥した清潔な状態で使用してください。特に洗濯後は、日陰で十分乾かしてから使用してください。カビの発生や、過湿による皮膚のしん軟(ふやけ)によるトラブルなどを引き起こすことがあります。</li><li>○本体にアウターカバーを掛け、ファスナーを完全に閉じてから使用してください。ファスナーが開いていると手や足に引っかかりケガをするおそれがあります。</li><li>○突起物や鋭利なものの上に置かないでください。</li><li>○折りたたんだり、丸めたりなど、圧迫した状態や、重量のあるものを置いた状態で保管しないでください。</li><li>○本製品のアウターカバーは撥水加工を施していますが汚れを完全に防ぐものではありません。失禁したり飲み物をこぼしたりした場合、内部に水分が染み込むことがあります。</li><li>○本体の中材を取り出さないでください。</li><li>○直射日光にあてないでください。ウレタンの劣化が早まります。</li><li>○本製品は、使用状況・環境によりウレタンが変色する場合があります。</li></ul>
ご使用を始められた後しばらくの間、臭いを感じる場合がございますが、体に害を与える様な有害物質は含んでおりません。気になる場合は、充分に陰干してから使用してください。	


## お手入れ方法

- 汚れた場合は、洗濯表示に従い洗濯してください。  
※洗濯後、カバーを被せる際に、カバーを強く引っ張らないようにしてください。
- 本体とアウターカバーで洗濯条件が異なります。アウターカバーを取り外し、別々に洗濯してください。

### 【本体】

- 洗濯ネットに入れて洗濯してください。
- 洗濯機によっては本体が入らない場合があります。その場合は専用の業者に依頼してください。
- 洗濯後は乾燥機を使って乾燥させてください。

## サポティクッションシリーズの種類と使用例

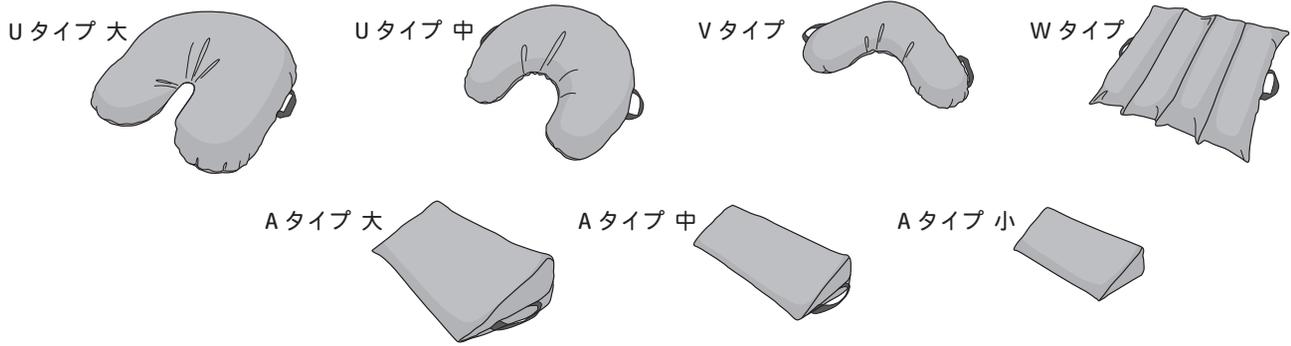


品名	品番	JANコード	TAISコード	サイズ	重量	定価
サポティ Uタイプ 大	KG1498	4971458670168	00357-000130	幅73×長さ77cm	約1850g	29,800円 (税込)
サポティ Uタイプ 中	KG1499	4971458670175	00357-000131	幅72×長さ64cm	約1350g	20,800円 (税込)
サポティ Vタイプ	KG1500	4971458670182	00357-000132	幅74×長さ40cm	約700g	15,800円 (税込)
サポティ Wタイプ	KG1501	4971458670199	00357-000133	幅75×長さ65cm	約1080g	20,800円 (税込)
サポティ Aタイプ 大	KG1502	4971458670205	00357-000134	幅38×長さ65cm	約720g	15,800円 (税込)
サポティ Aタイプ 中	KG1503	4971458670212	00357-000135	幅26×長さ60cm	約620g	13,800円 (税込)
サポティ Aタイプ 小	KG1504	4971458670229	-	幅20×長さ42cm	約240g	9,800円 (税込)

○クッションに体重が乗るように、クッションの高さを調整してください。

○クッションに体が乗ったら、体の上から軽く押さえながらやさしく揺らすようにして体をクッションに馴染ませてください。

○ポジショニング後は、クッションと体の間に手を差し込んで圧抜きをしてください。

### 腕に屈曲がある方

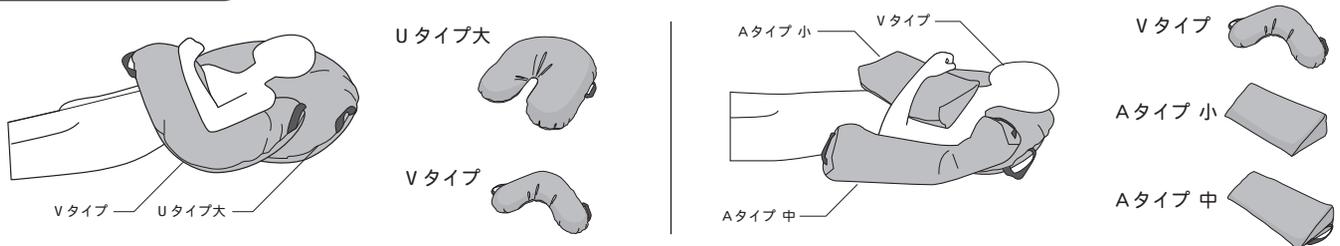

### 上半身と脚に屈曲がある方



### 完全伏臥位(90側臥位)



### 半側臥位(30側臥位)

