


このたびはお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みいただいた上でご使用ください。
また、この取扱説明書は、いつでもご覧いただけるように大切に保管していただくようお願い申し上げます。

マットの上に立つと不安定な状態になります。転倒を防ぐために以下の点を守ってご使用ください。

- 手すり、平行棒など体を支える物のある場所で使用してください。
- 転倒の危険のある方は、1人で使用せず介助者に補助してもらってください。
- 濡れている場所や滑りやすい場所には置かないでください。
- 本製品が汗や水に濡れた場合は、その都度拭き取ってください。
- 履物（靴やサンダル・スリッパなど）を履かずにご使用ください。
- 本製品のふちは踏まないでください。
- 身体に異常を感じている方、転倒してケガをしやすい方、妊娠中やその他転倒の危険性のある方はご使用を控えてください。
- 使用中に気分が悪くなるなどの異常を感じた場合は使用を中止してください。

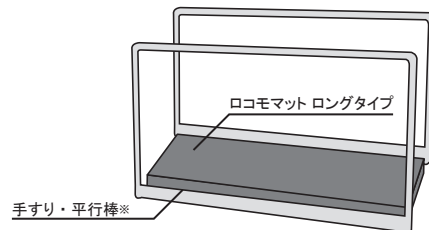

※手すり・平行棒は取り扱っておりません。
市販の製品をご使用ください。

お手入れ方法

- 本製品は洗えません。カバーから取り出さないでください。
- カバー表面が汚れた場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布を固く絞って拭き取り、水拭き後風通しのよい場所で陰干ししてください。

使用上のご注意

⚠ 警告

- 火又は温度の高いものに近づけないでください。火災や火傷の原因となります。
- 包装用のポリ袋をかぶると、窒息する危険があります。本製品を取り出した後は穴をあけて廃棄してください。
- 乳幼児が本体を口に入れると窒息する危険があります。乳幼児の手の届かない所に保管してください。
- 心臓マッサージ等、反動性の強い床の上でないと効果がない処置を行う場合は、ご使用を控えてください。

⚠ 注意

- 本製品の上で飛び跳ねないでください。けがをしたり、破損の原因となります。
- 人を乗せた状態で、本製品を移動させないでください。落下により怪我をする恐れがあります。
- 本製品の上で突起物（ハサミ、ナイフ等）の使用はお避けください。破損の原因になることがあります。
- 突起物のない平らな場所に設置してください。破損の原因になります。
- 持ち運ぶ時は、中のウレタン部分を持ってください。カバーだけで本製品を持ち上げるとカバーが破損することがあります。
- 局部的なへたり（へこみ）が見られる時は、効果が得られないことがありますので、使用しないでください。
- アンカ、電気毛布など高い温度で長い時間放置しますと変形する恐れがありますのでご注意ください。
- 低温環境下（5℃以下）では本体が硬くなることがあります。その場合は室温になじませてからご使用ください。
- 製品の品質・性能を保つため、直射日光、紫外線が当たらない場所に保管してください。
- 圧迫した状態での保管は避けてください。
- ご使用を始められた後しばらくの間、臭いを感じる場合がございますが、体に害を与える様な有害物質は含んでおりません。気になる場合は、十分に陰干してから使用してください。

製品仕様

材質／中 材：ウレタンフォーム
表 地：ポリエステル100%
ウレタンラミネートによる防水・特定用途制菌・難燃加工（GALAX MC）
底 面：ナイロンタフタ＋滑り止め加工
サイズ／幅500×長さ1800×高さ60mm