

このたびはお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みいただいた上でご使用ください。  
また、この取扱説明書は、いつでもご覧いただけるように大切に保管していただくようお願い申し上げます。


## ⚠ 取扱上のご注意

<p><b>警告</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○火または温度の高いものに近づけないでください。火災や火傷の原因となります。</li> <li>○包装用のポリ袋をかぶると、窒息する危険があります。クッションを取り出した後は穴をあけて廃棄してください。</li> <li>○カバーが破損して、中材を飲み込んでしまった場合、吸い込んだり耳に入ったりした場合は、医師に相談し指示に従ってください。</li> <li>○カバー破損などで中材がこぼれ出た場合、速やかに使用を中止し、ほかのポリ袋に入れるなど、中材が飛散して吸い込んだり飲み込んだりしないような処置をしてください。</li> </ul>
<p><b>注意</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○クッションで口や鼻を覆ってしまわないように配置してください。特に、うつ伏せや横向き時は十分にご注意ください。</li> <li>○ベッドや車いすなどに乗り降りする際は、クッションを外してください。転落してケガをするおそれがあります。</li> <li>○人が乗った状態のまま移動しないでください。転落してケガをしたり、クッションが破損するおそれがあります。</li> <li>○本製品だけでは床ずれは予防できません。体位変換を不要にするものではありませんので適切なケアを行ってください。</li> <li>○体格や目的に合わせてクッションを選んでお使いください。合っていないクッションを使うと十分な効果が得られないことがあります。</li> <li>○過度の荷重や力を加えると、破損の原因となります。特に認知症の方など、判断力や理解力等の問題から過度の力を加える可能性のある人にお使いいただく場合などは、十分に注意してください。</li> <li>○常に乾燥した清潔な状態で使用してください。特に洗濯後は、日陰で十分乾かしてから使用してください。 カビの発生や、過湿による皮膚のしん軟(ふやけ)によるトラブルなどを引き起こすことがあります。</li> <li>○突起物や鋭利なものの上に置かないでください。</li> <li>○折りたたんだり、丸めたりなど、圧迫した状態や、重量のあるものを置いた状態で保管しないでください。</li> <li>○ファスナーを開けないでください。</li> <li>○本体の中材を取り出さないでください。</li> <li>○直射日光にあてないでください。ウレタンの劣化が早まります。</li> <li>○本製品は、使用状況・環境によりウレタンが変色する場合があります。</li> <li>○本製品の製造上中材ウレタンの粉が表面に付着または、カバーの縫い目から出てくる場合があります。 取り除いた後にご使用ください。</li> </ul>
<p>ご使用を始められた後しばらくの間、臭いを感じる場合がございますが、体に害を与える様な有害物質は含んでおりません。気になる場合は、十分に陰干してから使用してください。</p>	

## お手入れ方法

- 洗濯の際は洗濯表示に従ってください。
- 本製品は丸洗い可能です。乾燥させる際には、タンブル乾燥を推奨します。

## 名称とサイズ

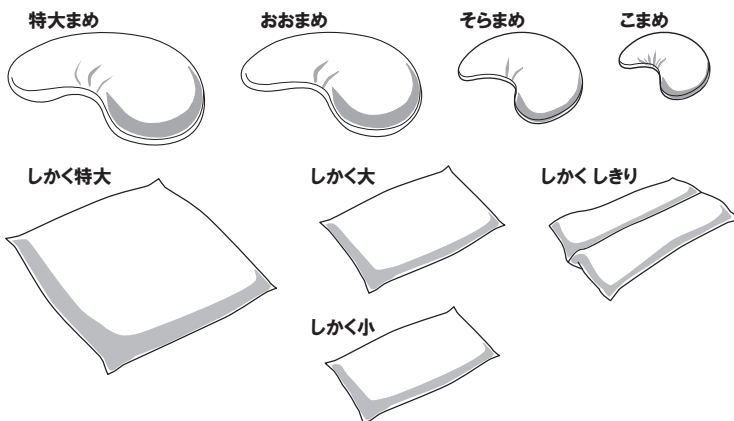

品名	商品番号	JANコード	寸法
特大まめ	KG1518	4971458672339	(約) 幅66×長さ40cm
おおまめ	KG1491	4905564991107	(約) 幅58×長さ40cm
そらまめ	KG1492	4905564991114	(約) 幅42×長さ29cm
こまめ	KG1493	4905564991121	(約) 幅31×長さ21cm
しかく特大	KG1517	4971458672322	(約) 幅75×長さ75cm
しかく大	KG1494	4905564991138	(約) 幅58×長さ38cm
しかく小	KG1495	4905564991145	(約) 幅58×長さ23cm
しかくしきり	KG1519	4971458672346	(約) 幅72×長さ48cm