

このたびはお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みいただいた上でご使用ください。  
また、この取扱説明書は、いつでもご覧いただけるように大切に保管していただくようお願い申し上げます。

## 使用上の注意

### ⚠ 警告


- 火または温度の高いものに近づけないでください。火災や火傷の原因となります。
- 包装用のポリ袋をかぶると、窒息する危険があります。マットを取り出した後は穴をあけて廃棄してください。
- 乳幼児が本体を口に入れると窒息する危険があります。乳幼児の手の届かない所に保管してください。

### ⚠ 注意

- 皮膚に反応性の充血など、圧迫による影響が見られないか、状態を観察しながらお使いください。異常が認められた場合直ちに使用を中止し、医師等の指示に従ってください。特に本製品を使い始めた時は、こまめに皮膚の状態を確認してください。
- 本製品の上で飛び跳ねないでください。けがをしたり、破損の原因となります。
- 人を乗せた状態で、本製品を移動させないでください。落下により怪我をする恐れがあります。
- 本製品の上で突起物（ハサミ、ナイフ等）の使用はお避けください。破損の原因になることがあります。
- 突起物のない平らな場所に設置してください。破損の原因になります。
- カバーだけで本製品を持ち上げるとカバーが破損することがあります。必ず中材ごと一緒に持ち上げ移動させてください。
- 局所的なへたり（へこみ）が見られる時は、十分な圧力分布効果が得られないことがありますので、使用しないでください。
- アンカ、電気毛布など高い温度で長い時間放置しますと変形する恐れがありますので注意ください。
- 製品の品質・性能を保つため、直射日光、紫外線が当たらない場所に保管してください。
- 圧迫した状態での保管は避けてください。
- 本製品は、使用状況・環境によりウレタンが変色する場合がありますが、性能には問題ありません。
- ご使用を始めた後しばらくの間、臭いを感じる場合がございますが、体に害を与える様な有害物質は含んでおりません。気になる場合は、十分に陰干してから使用してください。

## ご使用方法

- 「ORBIT」のロゴ印刷がある面を上にご使用ください。  
（ロゴがない底面は身体を支えるための硬めのウレタンフォームを使用しています。）
- 本製品は ①幅910×長さ1910mm ②幅830×長さ1910mm  
①②の2種類あります。お使いのベッドのサイズに合わせてご使用ください。

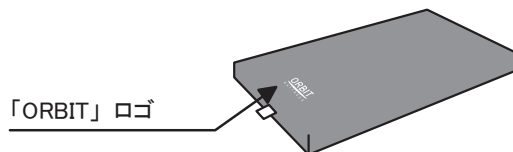

## お手入れ方法

### 【カバー】

- 1、中性洗剤などを水で希釈しマットレス表面を拭いてください。  
シンナー、ベンジン、ガソリン等揮発性のものでは絶対に拭かないでください。
- 2、消毒用アルコールでマットレス全面を清拭消毒してください。  
塩素系薬剤、イソジンなどの着色のある薬剤、クレゾール系薬剤は使用しないでください。  
薬液清拭後には出来るだけ水拭きを行い薬剤の残留を防いでください。
- 3、清拭後は自然乾燥させてから使用してください。

### 【ウレタン中芯】

洗濯することはできません。ファスナーを開けて中身を出さないでください。